



Säkerhetskanyl till insulinpenna/Autoshield Duo Pennkanyl

Det finns ett EU direktiv från 20130501 som syftar till att förebygga stick och skärskador. Om det finns sticksäkra produkter ska de användas. I Arbetsmiljöverkets föreskrift 2012:7, § 8a står det att när man i sitt arbete ger andra insulin och inte använder sticksäkra kanyler så uppfyller man inte kravet.

Säkerhetskanylen ska användas till alla patienter. Det är en arbetsmiljöåtgärd och ska därför faktureras berörda Enhetschefer för Socialtjänst respektive LSS.

Beställs från **One Med**

art nr: 211330/Kanyl till insulinpenna/Autoshield Duo Pennkanyl/0,30x5mm/750kr/fp

Kanylen kan användas till alla insulinpennor, är stickskyddad i båda ändar och låses automatiskt efter injektion

På nedanstående länk finns information om kanylens funktion.

[Demonstrationsfilm](#)

Syftet med filmen är att sjuksköterskor och omvårdnadspersonal ska få en tydlig instruktion om hur kanylen fungerar. Viktigt för alla att träna med testpenna och stickkudde innan säkerhetskanylen används i praktiken. Penna och stickkudde kan hämtas hos utbildningsteamet.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

- Använd tekniken med **lyft hudveck** under hela injektionen
- För kanylen **rakt in** i huden till dess det **genomskinliga yttre skyddet** dras tillbaka och den vita hylsan är alldeles intill huden
- Behåll **konstant tryck** mot huden och injicera dosen
- Lämna kanylen i huden under minst 10 sekunder efter det att kolven är helt intryckt
- Lyft bort pennan från huden, det inre skyddet vecklar automatiskt ut sig och låses fast
- Ett **RÖTT** indikeringsband visar sig som bekräftar att skyddet är låst och att pennkanylen är använd