




Kristianstads
kommun
Omsorgsförvaltningen

LYFTUTPROVNINGS PROTOKOLL

AKUTLYFT


Modell på lyftsele:

Liko Originalsele Polyester Hög Rygg storlek Medium

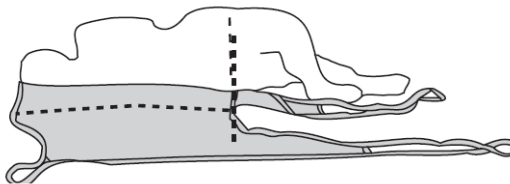

Läs först igenom informationsbladet och tänk på att det alltid måste vara två omvårdnadspersonal vid användande av akutlyft varav minst en ordinarie med erfarenhet av att använda lyft.

Applicera lyftselen i liggande eller sittande. Lyftselsens nederkant ska ända ner till svanskotan. OBS! Mycket viktigt!

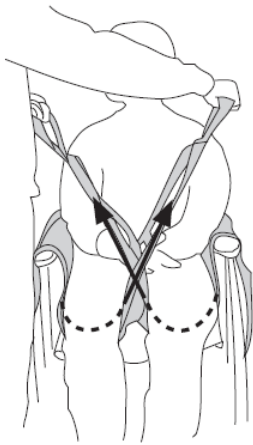

Benstöden ska korsas och placeras högt upp på låret för att minimera urglidningsrisk.

Ytteröglor ska användas

Armarna ska hållas innanför.

Börja lyftet med att höja lyftbygeln tills lyftbanden är sträckta. Kontrollera att lyftbanden är korrekt kopplade, att brukaren sitter bra och är medveten om vad som ska ske.

Lyft en bit från underlaget och kontrollera att brukaren inte riskerar att glida ur selen. Fullfölj sedan lyftet.

Förflyttningssträckan ska vara så kort som möjligt och man ska aldrig lyfta högre än nödvändigt.

Lyftet ska ske rakt upp – tyngdpunkten måste bibehållas inom understödsytan.

